


Protocole de préparation d'un échantillon avec Bfast™ [SARS-CoV-2] RT-PCR kit

Temps estimé : 2-3 min de préparation - moins de 15 min de RT-PCR

1

P1000
ou
P200

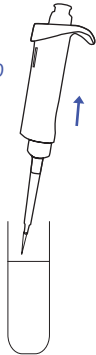


Prélever 200 µl d'échantillon.

2



Utiliser le tube 0
(bleu)

P1000
ou
P200

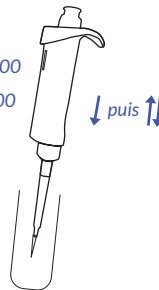

Mettre les 200 µl dans le Tube 0 (Tampon de lyse) et faire 10 allers retours avec la pipette.


3



Utiliser le même tube 0 (bleu)



Utiliser le tube 1 (violet)

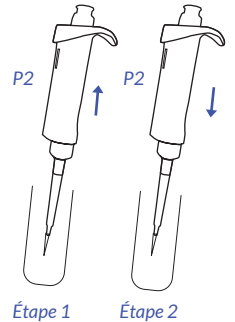


Étape 1 Prélever 1,2 µl du lysat
Étape 2 et l'ajouter dans le Tube 1 (Mix RT-PCR).

4



Utiliser le même tube 1 (violet)


P100

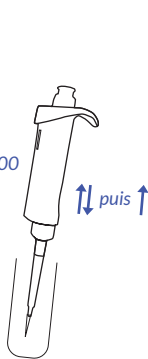

Homogénéiser avec 10 allers retours puis prélever 25 µl du mélange.

5

P100

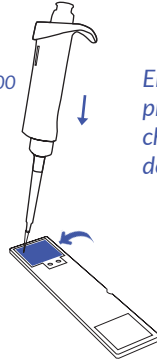

Enlever le film de protection collé à la chambre réactionnelle de la puce de réaction.

Insérer les 25 µl dans la puce. Retirer l'opercule du film de scellement. Sceller la puce.

6



Lancer le protocole 'Bfast SARS-CoV-2' sur Chronos Dx.
Quand le message "Insert chip" en haut à gauche de l'écran est indiqué, insérer la puce scellée.



Nos conseils

S'assurer de la décongélation complète du Tube 1 (Mix RT-PCR) avant son utilisation.

Ne pas oublier d'enlever le premier film de protection de la puce, collé à la chambre, avant d'injecter le mélange réactionnel.

S'assurer que le protocole 'Bfast SARS-CoV-2' est sélectionné dans l'onglet configuration.

Lors de l'injection du mélange réactionnel, s'assurer que la pointe du cône de la pipette est bien placée verticalement dans l'orifice d'injection.

Vous avez une question ?

Contactez-nous

BforCure - 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil
Service Commercial Tel : 01 84 25 16 15
bforcure.com/contact/