

Remplissage de Chronos Dx

Le logiciel de Chronos Dx guide l'utilisateur pas à pas lors du remplissage. Des pop-ups apparaissent durant la procédure.

1




Cliquer sur l'onglet "Maintenance" dans le logiciel de Chronos Dx.

2




Cliquer sur "Fill the instrument" et valider votre choix.

3

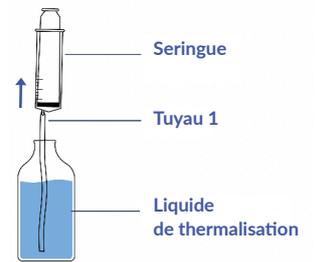


Connecter la seringue au tuyau 1 puis la remplir avec le liquide de thermalisation.

4

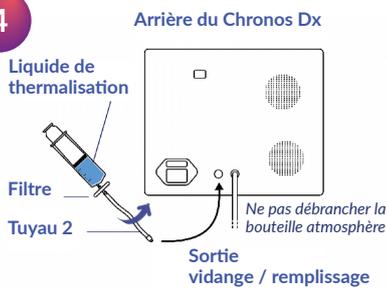


Raccorder la seringue au filtre et au tuyau 2 et à la sortie vidage remplissage Chronos Dx.

5

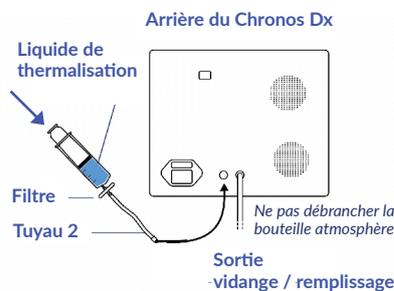

Appuyer sur le piston de la seringue pour remplir Chronos Dx jusqu'à ce qu'il émette des bips sonores.

6

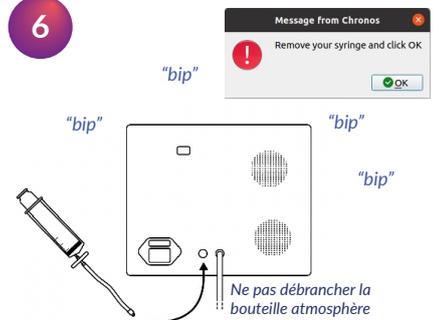

Retirer le tuyau 2 du port extérieur de Chronos Dx en appuyant sur la pièce métallique et cliquer sur OK.

7

Attendre 30 secondes et recommencer le protocole de l'étape 3 à 6.

8

Chronos Dx passe dans l'état "Initialisation".

Status : Idle

Le dispositif est prêt à l'emploi lorsqu'il revient en « IDLE » et lorsque les boutons de l'onglet « MAINTENANCE » et la led deviennent bleus.



Nos conseils

Le remplissage s'effectue après une vidange de Chronos Dx ou lorsque l'instrument le demande.

ATTENTION

Les opérations suivantes s'effectuent :

- lorsque le statut de Chronos Dx sur le logiciel est en "IDLE"
- à distance des prises et des appareils électriques.

Vous avez une question ?
Contactez-nous

BforCure - 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil
Service Commercial Tel : 01 84 25 16 15
bforcure.com/contact/

Pour plus d'informations, lire attentivement le manuel utilisateur et l'étiquetage des dispositifs Chronos Dx et de son logiciel associé.